

## Starkiss Blanchiment

Produit cosmétique d'éclaircissement dentaire ambulatoire.

### LE + PRODUIT

PRODUIT COSMETIQUE A BASE DE:

**PEROXYDE DE CARBAMIDE**

agent réactif concentré à 16% correspondant à 6% de peroxyde d'hydrogène.

**PH NEUTRE**

favorise l'action des radicaux libres

**NITRATE DE POTASSIUM**

pour son action désensibilisante

**FLUOR**

pour la reminéralisation de l'émail

**SOLUTION AQUEUSE**

favorise la réhydratation

**GEL THIXOTROPE**

permet au gel de rester en place dans la gouttière

### CONDITIONNEMENT

Le «kit patient» peut être complété par le réassort d'une seringue de 3ml, (vendue par 2) soit en complément du traitement initial soit pour effectuer un rappel sous 3 à 6 mois.



Exemple de résultat obtenu.



### LES RÉFÉRENCES

Kit Patient :

Réf. H00150 Lot de 2 « kits Patient » de 2 seringues de 3ml de gel à 16 % de peroxyde de carbamide + mode d'emploi patient.

Le kit HT 114<sup>€60</sup> TTC **137<sup>€52</sup>**

par 2 kits, 10% le kit HT 103<sup>€14</sup> TTC **123<sup>€77</sup>**

par 3 kits, 25% le kit HT 85<sup>€95</sup> TTC **103<sup>€14</sup>**

### LES RÉFÉRENCES

Réassorts Patient :

Réf. H00165 Lot de 2 « réassorts Patient », chaque réassort contenant : 1 seringue de 3ml de gel à 16 % de peroxyde de carbamide + mode d'emploi patient.


Le lot de 2 seringues HT 47<sup>€98</sup> TTC **57<sup>€58</sup>**

par 2 lots, 10%, le lot de 2 seringues HT 43<sup>€18</sup> TTC **51<sup>€82</sup>**

par 3 lots, 25%, le lot de 2 seringues HT 35<sup>€99</sup> TTC **43<sup>€18</sup>**

Ref. H00190 Kit Salle d'attente: 1 présentoir + flyers  
*Offert pour l'achat d'un lot kit patient*

Produit cosmétique. Se référer à la notice.

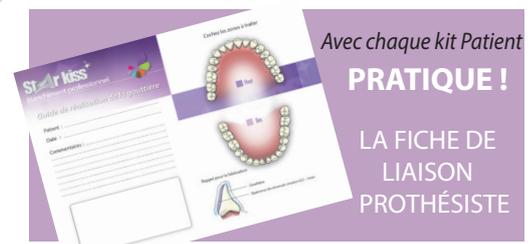

## Starkiss Blanchiment

Produit cosmétique d'éclaircissement dentaire ambulatoire.

### Cas clinique


Situation initiale A3,5/C3

A 15 jours A1/C1



Situation de départ, patiente de 63 ans.

Prise de teinte, arcades haut A3,5 et bas C3. Report sur le teintier papier

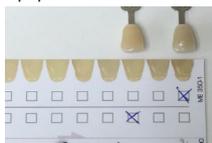

Prises d'empreintes



Réalisation des gouttières souples au laboratoire, pas besoin de réaliser de réservoir



Conservation et remise des gouttières au patient sur les modèles en plâtre pour limiter le risque de déformation et permettre un rangement de qualité.



Essais des gouttières et conseils pour le port, le nettoyage et le stockage



Explication de l'utilisation du gel et son dosage. Une goutte suffit car le gel fuse et recouvre la dent. Astuce: les zones à traiter peuvent être montrées avec du gel orthophosphorique pour une meilleure compréhension par le patient, puis la gouttière est rincée.



Situation initiale

Situation après 7 jours

Situation après 14 jours



Contrôle de teintes après traitement, report sur le teintier papier.



## Boîtes à dents Souris Fun

Boîtes à dents exclusives aux couleurs tendances. Création Originale APOL. Fabrication française.

### LE + PRODUIT

COLORANTS ALIMENTAIRES  
PLÉBISCITÉ PAR LES PETITS PATIENTS  
POUR UNE OU PLUSIEURS DENTS

### LES RÉFÉRENCES

Le sachet : HT 31<sup>€98</sup> TTC **38<sup>€38</sup>**  
Par 2, 25%, le sachet HT 23<sup>€99</sup> TTC **28<sup>€78</sup>**

Le sachet de 48 souris couleurs assorties H70070  
Le sachet de 48 souris roses H70080  
Le sachet de 48 souris bleues H70075

Sachet  
de 48  
BOITES À DENTS  
souris



## Starkiss Vernis

Agent de traitement des sensibilités,  
de protection et de régénération

### LE + PRODUIT

- APPORT DE FLUOR ET CALCIUM
- PROTECTION APRÈS ÉCLAIRCISSEMENT
- SCELLEMENT DES SILLONS



Traitement immédiat et efficace des hypersensibilités dentinaires et des collets

- Fermeture des tubulis par le film silicone. Liaison hydroxie-apatite par l'apport de fluor olafur et calcium. Protection suite à un traitement éclaircissant
- Évite le dépôt d'agents colorants et protège des attaques acides organiques.
- La formulation fluor apatite participe à la re-minéralisation de la dent. Solution pour les patients sujets aux poly-caries et protection des zones à risques en orthodontie.

Scellement des sillons : destiné aux patients présentant des difficultés à accepter les traitements des puits et fissures conventionnels.



### LES RÉFÉRENCES

Le coffret contient : 1 flacon de 5 mL, 20 applicateurs à usage unique, 4 blocs à alvéoles pour mélange et 1 mode d'emploi.

H00040


Le coffret : HT 115€<sup>33</sup> TTC 138€<sup>40</sup>

par 2, le coffret, 10%, HT 103€<sup>79</sup> TTC 124€<sup>55</sup>


### Agent de traitement des sensibilités de protection et de régénération



1 Avant application, sur dents détartrées et séchées suivant le mode emploi, bien secouer la bouteille de Star Kiss Vernis.

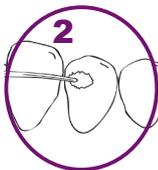

2 Appliquer une très fine couche de Star Kiss Vernis, en évitant le contact avec les muqueuses.

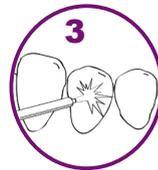

3 Sécher, puis polir légèrement avec un polissoir conventionnel.



4 Refermer la bouteille immédiatement après utilisation.

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage. Starkiss Vernis : classe du DM : IIa - Organisme notifié : Medcert.