

## Starkiss Vernis

Agent de traitement des sensibilités,  
de protection et de régénération

### LE + PRODUIT

APPORT DE FLUOR ET CALCIUM  
PROTECTION APRÈS ÉCLAIRCISSEMENT  
SCÈLÈMENT DES SILLONS



Traitement immédiat et efficace des hypersensibilités dentinaires et des collets

- Fermeture des tubulis par le film silicone. Liaison hydroxie-apatite par l'apport de fluor olafur et calcium.
  - Protection suite à un traitement éclaircissant
  - Évite le dépôt d'agents colorants et protège des attaques acides organiques.
  - La formulation fluor apatite participe à la re-minéralisation de la dent.
- Solution pour les patients sujets aux poly-caries et protection des zones à risques en orthodontie.

Scellement des sillons : destiné aux patients présentant des difficultés à accepter les traitements des puits et fissures conventionnels.



### LES RÉFÉRENCES

Le coffret contient : 1 flacon de 5 mL, 20 applicateurs à usage unique,  
4 blocs à alvéoles pour mélange et 1 mode d'emploi.

H00040


Le coffret : HT 115€<sup>33</sup> TTC 138€<sup>40</sup>

par 2, le coffret, 10%, HT 103€<sup>79</sup> TTC 124€<sup>55</sup>

Agent de traitement des sensibilités  
de protection et de régénération



1 Avant application, sur dents détartrées et séchées suivant le mode emploi, bien secouer la bouteille de Star Kiss Vernis.

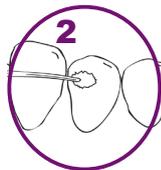

2 Appliquer une très fine couche de Star Kiss Vernis, en évitant le contact avec les muqueuses.



3 Sécher, puis polir légèrement avec un polissoir conventionnel.



4 Refermer la bouteille immédiatement après utilisation.

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage. Starkiss Vernis : classe du DM : IIa - Organisme notifié : Medcert.